

1 DISPOSITIF CONNECTÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Lorsque vous branchez l'adaptateur d'alimentation du RASC^{MD} Pronto^{MD}, le voyant lumineux à DEL passe au jaune ▲



2 DISPOSITIF CONNECTÉ AU RÉSEAU


Lorsque vous connectez le RASC^{MD} Pronto^{MD} à Internet, le voyant lumineux à DEL passe au vert



Remarque : Si le voyant lumineux à DEL est vert, mais que le dispositif est indisponible pour effectuer un test, communiquez avec RASC^{MD}, car le réseau est probablement bloqué (pare-feu).

3 DISPOSITIF PRÊT À EFFECTUER UN TEST


Après l'insertion d'une bandelette d'analyse dans le RASC^{MD} Pronto^{MD}, le voyant lumineux à DEL passe au bleu. Vous pouvez alors cliquer sur « Begin Test » (Exécuter l'analyse) dans le RASC^{MD} Portail de soins aux patients.

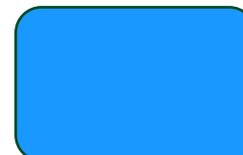



4 DISPOSITIF EXÉCUTANT UN TEST

Lorsque le RASC^{MD} Pronto^{MD} effectue un test, le voyant lumineux à DEL devient blanc.

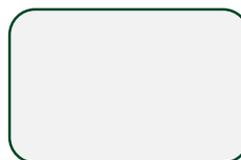

5 PROBLÈME DE DISPOSITIF

Si le voyant lumineux à DEL du RASC^{MD} Pronto^{MD} passe au rouge, il y a probablement un problème de connectivité ou un problème avec le dispositif. Vérifiez la connexion à Internet. Si le problème persiste, téléphonez à RASC^{MD} au 1-800-267-2726 pour obtenir de l'aide.

