



## 1 STATUT DU DISPOSITIF – NON-DISPONIBLE OU EN COURS D'UTILISATION

Si votre dispositif affiche le statut **non-disponible** ou en **cours d'utilisation** :

1. Entrez le **n° de lot de la bandelette d'analyse**
2. Entrez la **date d'expiration**
3. Cliquez sur **actualiser** jusqu'à ce que le dispositif vérifie le statut et retourne à **disponible**. Si le statut du dispositif ne passe pas à disponible après 5 minutes et que vous avez une bonne connexion Internet, appelez le RASC<sup>MD</sup>.

Selection de l'appareil

Fermer Retour Suivant Actualiser

Veuillez sélectionner un appareil disponible parmi la liste suivante des appareils :

| Nom          | Identifiant     | Stat           | Appareil              |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| HLSDemo_TAT  | 000000074877CC8 | Non-disponible | <input type="radio"/> |
| Stephanie #1 | 00000009945989e | Disponible     | <input type="radio"/> |
| Manuel #1    | 0000000027371bf | Disponible     | <input type="radio"/> |

Veuillez entrer les informations de la bandelette

Numéro de lot de la bandelette :

Date d'expiration de la bandelette :

Veuillez entrer le numéro d'assurance maladie du patient

Si le numéro est incorrect, il provient du dossier RASC<sup>MD</sup> existant. En cas de divergence avec le numéro d'assurance maladie, veuillez communiquer avec le RASC<sup>MD</sup> au 1-800-267-2726.

Numéro d'assurance maladie :

## 2 CONNEXION/OPTIQUE/ERREUR DE BANDELETTE D'ANALYSE

### Erreur de communication :

Fermez la fenêtre

- Attendez 60 secondes
- Refaites le test

Erreur

Retour Fermer

Message d'erreur :

Erreur de communication, veuillez patienter 60 secondes et réessayer le test. Si vous recevez cette erreur deux fois, veuillez communiquer avec le RASC<sup>MD</sup> au 1-800-267-2726 pour obtenir de l'aide.

### Erreur dispositif :

Fermez la fenêtre

- Vérifiez la connexion
- Le voyant lumineux à DEL devrait être **VERT**
- Assurez-vous de n'avoir qu'une fenêtre ou qu'un navigateur ouvert dans le Portail de soins aux patients RASC<sup>MD</sup>

### Erreur optique ou liée à la bandelette d'analyse :

Ouvrez la fenêtre

- Assurez-vous que la bande magnétique soit insérée en premier, avec l'encoche en V sur le dessus
- Assurez-vous que la chambre principale de la bandelette d'analyse soit complètement remplie
- Laissez l'échantillon reposer pendant 5 minutes pour garantir une coloration adéquate
- Si l'échantillon contient des bulles d'air ou s'il est insuffisant, jetez la bandelette et prenez un nouvel échantillon

Erreur

Retour Fermer

Message d'erreur :

Erreur de bande optique / bandelette - Veuillez jeter la bandelette et en utiliser une autre.

Erreur

Retour Fermer

Message d'erreur :

La bandelette de test ne contient pas une distribution uniforme de cellules. Veuillez jeter la bandelette de test et en remplir une autre.

Erreur

Retour Fermer

Message d'erreur :

La lentille de l'appareil est sale, veuillez déconnecter l'appareil, nettoyer la lentille avec une tige de nettoyage optique, reconnecter l'appareil et réessayer le test.

3

## PLAGE D’AFFICHAGE

La plage d’affichage du RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup> pour la numérotation leucocytaire est de 1,0 à 25,0 x 10<sup>3</sup>/µL

Code d’erreur

Supérieur à la plage d’affichage

Erreur

Message d'erreur :

Les valeurs Leuco ou NAN déterminées sont supérieures à la plage d’affichage. Veuillez répéter une analyse RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MC</sup> ou effectuer une analyse veineuse.

Retour Fermer

Code d’erreur

Inférieur à la plage d’affichage

Erreur

Message d'erreur :

Les valeurs Leuco ou NAN déterminées sont inférieures à la plage d’affichage. Veuillez répéter une analyse RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MC</sup> ou effectuer une analyse veineuse.

Retour Fermer

Refaites un test avec le RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup> ou dirigez le patient vers le laboratoire pour obtenir un échantillon de sang veineux.

4

## EXPIRATION

Le Portail de soins aux patients RASC<sup>MD</sup> expire au bout de 20 minutes. Si le test du RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup> excède 20 minutes, le système mettra automatiquement fin à celui-ci.

Erreur

Message d'erreur :

Le temp alloué par le système a expiré, veuillez relancer l’analyse.

Retour Fermer



**Le mode veille du dispositif**  
mettra le test en pause et  
augmentera le temps requis pour le  
compléter

Assurez-vous d’avoir une bonne  
connexion Internet